



ro

DMV® Scleral cup™

Pentru lentilele dure și lentilele gaz-permeabile

### ÎNDEPĂRTAREA

Strângeți mânerul conic al ventuzei Scleral cup și aplicați-o cu atenție pe suprafața frontală a lentilelor de contact. Când ventuza a fost așezată corect pe lentilă, eliberați presiunea de pe mâner și îndepărtați ușor lentilele de contact de pe ochi. Pentru a scoate lentilele de pe ventuza Scleral cup, strângeți din nou mânerul pentru a elibera vidul. Glisați lateral lentila de pe ventuză.

**Precauții:** În cazul în care Scleral cup se atașează involuntar pe suprafața ochiului, strângeți ușor mânerul pentru a elibera aspirația.

### POZIȚIONAREA LENTILEI PE OCHI

Plasați lentila de contact umezită cu grijă pe capătul liber al ventuzei. NU strângeți mânerul. Lentila umezită va adera la ventuză. Așezați lentila pe ochi. În cazul în care lentila se întâmplă să rămână pe ventuză, strângeți ușor mânerul Scleral cup și lentila va rămâne pe ochi.

### CURĂȚAREA VENTUZEI

Păstrați-vă ventuza curată prin spălare în apă caldă cu săpun. Se lasă să se usuce la aer.

Păstrați ventuza și toate celelalte dispozitive medicale departe de copiii mici. \*\* Pericol de sufocare \*\*

Acest dispozitiv nu este recomandat pentru utilizarea în cazul afecțiunilor oculare. Nu utilizați cu lentilele de contact moi.

**Atenție:** Acest produs conține latex din cauciuc natural și poate provoca reacții alergice.

*"Efectuați anual un control oftalmologic."*



ro

DMV® ULTRA™

Pentru lentilele dure și lentilele gaz-permeabile

### ÎNDEPĂRTAREA

Umeziți ventuza și ghidați-o spre ochi. Asigurați-vă că lentila de contact este centrată pe ochi înainte de scoatere. Aliniați ventuza astfel încât să fie poziționată în fața și paralelă cu lentila. Când ventuza atinge lentila, aplicați o presiune ușoară pentru a face ca lentila să adere la ventuză. Îndepărtați lentila de contact de pe ochi. Este sigur și ușor. După îndepărtarea de pe ochi a lentilei, îndepărtați lentila ușor în lateral de pe ventuză.

**Precauții:** În cazul în care ventuza se atașează neintenționat pe ochi, glisați în colțul exterior și îndepărtați ventuza prin răsucire.

### POZIȚIONAREA LENTILEI PE OCHI

Puneți lentila umezită pe ventuza de aplicare din capătul mânerului. Lentila va adera în această poziție în timp ce va fi pusă pe ochi. Atingeți lentila umezită de ochi și aceasta se va transfera repede pe ochi de pe ventuza de aplicare.

### CURĂȚAREA VENTUZEI

Păstrați-vă ventuza curată prin spălare în apă caldă cu săpun. Se lasă să se usuce la aer. Veți putea fierbe sau autoclava (steriliza) ventuza, dacă doriți. NU autoclavați suportul ventuzei.

Păstrați ventuza și toate celelalte dispozitive medicale departe de copiii mici. \*\* Pericol de sufocare \*\*

Acest dispozitiv nu este recomandat pentru utilizarea în cazul afecțiunilor oculare. Nu utilizați cu lentilele de contact moi.

**Atenție:** Acest produs conține latex din cauciuc natural și poate provoca reacții alergice.

*"Efectuați anual un control oftalmologic."*

MMC Rou15



**Manufacturer:**

DMV Corporation, 1024 Military Road, Zanesville,  
Ohio 43702-0878, USA

M U Rou15

**EC/Rep:**

Prolens AG, Josefstrasse 53, CH-8005 Zurich, Suisse

**Distributor:**

Prolens AG, Josefstrasse 53, CH-8005 Zurich, Suisse

Date of Issue 11/2014 F127/1  
2014-12

